

Manuel Utilisateur

XploreView Web

V7.2.35.19



Date d'émission : 19-03-2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	Utilisation prévue	3
2.1	Description, Usage Revendiqué.....	3
2.2	Objectif médical	4
2.3	Population de patient	4
2.4	Utilisateur prévu.....	4
2.5	Utilisation.....	4
2.6	Caractéristiques.....	4
3	Précautions	4
3.1	Utilisation conforme	4
3.2	Consignes de sécurité	5
3.3	Dysfonctionnement	5
4	Prérequis.....	7
4.1	Matériel.....	7
4.2	Logiciel.....	7
4.3	Réseau.....	7
5	Mise à jour et incompatibilités	9
5.1	Antivirus.....	9
5.2	Windows Server Update Services	9
6	Installation - Désinstallation	10
6.1	Installation.....	10
6.2	Intégration contextuelle avec un RIS/SIH.....	10
6.3	Désinstallation	10
7	Démarrage – Authentification	11
8	Arrêt du logiciel	11
9	Utilisation du logiciel.....	12
9.1	Ecran de visualisation	12
9.2	Boutons d'action	13
9.3	Fenêtre « A propos »	17
10	Maintenance.....	18
11	Dépannage, Messages d'erreur.....	18
12	Garantie	21
13	Mentions légales.....	21
13.1	Responsabilités	21
13.2	Copyrights et marques.....	21
14	Contact Fabricant.....	22

1 Introduction

Ce document est le guide utilisateur du logiciel XploreView Web version V7.2.35.19, conçu par EDL.

Il est recommandé de lire attentivement les instructions avant d'utiliser le logiciel.

Veuillez lire attentivement les précautions marquées du symbole , pour vous assurer que l'appareil est utilisé dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

Ci-dessous les différents symboles réglementaires utilisés dans le document et le logiciel :

Symbole	Signification
	« Usine » Ce symbole doit être suivi par le nom et l'adresse du fabricant (qui a mis le dispositif médical sur le marché), juste après le symbole.
	« Date de publication » (avec la date respectant le formalisme AAAA-MM-JJ)
	« Lire le manuel utilisateur »
	« Attention » Ce symbole de sécurité est utilisé pour indiquer certaines précautions spécifiques à prendre. Ce symbole «Attention» signifie «Attention, lire le manuel utilisateur »
	Numéro de version du logiciel.
	Logo qui indique que le logiciel est un dispositif médical .
	Logo qui précède le numéro d'identification du dispositif.
	Le logo de l'importateur / CH-REP.



2 Utilisation prévue

2.1 Description, Usage Revendiqué

XploreView Web est une solution logicielle dont l'usage revendiqué est de fournir une aide au diagnostic pour des médecins. Ce logiciel est un dispositif médical.

Il affiche des images médicales et fournit des outils de traitement numériques aux utilisateurs.

Pour avoir accès aux images, il s'interface avec un ou plusieurs PACS (Picture Archiving and Communication System).

Il est possible d'utiliser le logiciel dans un environnement clinique, mais aussi en garde radiologique ou pour de la téléradiologie.

2.2 Objectif médical

Le but médical de l'application est de permettre à des radiologues et praticiens d'interpréter des examens d'imagerie médicale (exceptée mammographie) afin d'émettre un diagnostic.

2.3 Population de patient

Sont concernés par ce dispositif, tous les patients pouvant faire l'objet d'examens médicaux basés sur de l'imagerie : scanner, IRM, échographe, radiologie numérique et autres.

Le patient n'est pas l'utilisateur du dispositif.

2.4 Utilisateur prévu

L'application est utilisée exclusivement par des radiologues et praticiens dans le but d'interpréter des examens d'imagerie médicale.

Le dispositif ne doit être utilisé, à des fins d'aide au diagnostic, que par des professionnels de la santé, formés à l'interprétation d'images médicales.



2.5 Utilisation

Conditions de visibilité :

- Logiciel destiné à être utilisé sur le support informatique d'exploitation, y compris un ordinateur portable dont l'angle d'observation ne doit pas s'écarter du cône de visibilité propre à l'écran utilisé.

Fréquence d'utilisation :

- Une fois par an jusqu'à 80 fois par jour. Attention aux utilisations prolongées d'écrans d'ordinateur pouvant provoquer une fatigue oculaire et une altération de la vision.

2.6 Caractéristiques

Le logiciel possède les principales caractéristiques suivantes :

- ✓ Compatible ordinateurs desktops (cf. §Prérequis).
- ✓ Compatible navigateurs internet Chrome, Firefox et Internet Explorer (cf. §Prérequis).
- ✓ Console de traitement d'images multi-modalité intégrant tous les outils nécessaires pour l'interprétation des clichés (fenêtrage, zoom, mesures de distance, mesures d'angle et mesures spécifiques).
- ✓ Modules MPR, MIP et synchronisation de coupes.
- ✓ Transfert sécurisé via le protocole SSL.
- ✓ Intégration contextuelle avec un RIS ou un SIH.
- ✓ Affichage des antécédents des patients.
- ✓ Différents modules pour diffuser les images :
 - Export des images aux formats DICOM et PNG sur le disque dur.
 - Envoi d'email avec génération d'un lien unique qui pointe vers l'examen.

3 Précautions

3.1 Utilisation conforme

Voir §2 « Utilisation prévue ».

Toute utilisation inappropriée est interdite.

Vérifier que le produit est opérationnel en tout temps et gardez-le en bonnes conditions d'utilisation.

Seuls les techniciens d'EDL sont autorisés à intervenir sur l'administration de XploreView Web.

⚠ Les mesures et leurs valeurs sont données à titre indicatif. En effet, EDL ne peut pas garantir la chaîne d'acquisition des images, ainsi que l'exactitude et le contrôle des valeurs des mesures.

3.2 Consignes de sécurité

Voir §10 « Dépannage, Messages d'erreur ».

⚠ Le logiciel doit être installé dans une zone médicale à accès maîtrisé.

Les mots de passe doivent respecter des règles de complexité et rester confidentiels à l'utilisateur.

Les utilisateurs doivent verrouiller leur poste avant de s'absenter.

3.3 Dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnement :

- Arrêter immédiatement l'utilisation du logiciel.
- Essayer d'identifier ou d'éliminer les causes en utilisant le mode opératoire décrit dans ce document (paragraphe Messages d'erreur, dépannage).
- S'il n'est pas possible d'identifier ou d'éliminer la cause en utilisant ce document, appelez le service après-vente d'EDL (cf. §13 Fabricant à la fin de ce document).
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification :

- **à EDL :**

- **Site internet :** <http://www.edl.fr>
- **Email :** support@edl.fr
- **Tel :** +(33) 4.13.96.10.00
- **Courrier :**
Société EDL
509, avenue de la victoire du 8 mai 1945
13130 Berre l'Étang

- **à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :**

- **Site internet :** <https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-indesirable/comment-declarer-si-vous-etes-professionnel-de-sante>
- **Email :** materiovigilance@ansm.sante.fr
- **Fax :** 01.55.87.37.02
- **Courrier :**
ANSM
Direction de la surveillance
Pôle pilotage processus et réseaux



143/147 boulevard Anatole France
93285 St Denis Cedex

- Contact Autorité Compétente en Suisse (Swissmedic) :
 - **Email :** materiovigilance@swissmedic.ch
- Contact Mandataire CH-REP en Suisse :
 - **Email :** vigilance@medenvoyglobal.com

4 Prérequis

4.1 Matériel

Les postes de travail devront respecter les prérequis suivants :

- Processeur de type Intel core i3 minimum
- 4 Go de RAM

L'espace disque local importe peu.

Les images doivent être visualisées sur un écran certifié Medical Display car ils possèdent une résolution de pixel importante et car il est possible de les calibrer via un capteur externe.

Faire une recherche sur Internet ou contacter le fournisseur pour savoir si l'écran est bien certifié Medical Display.

4.2 Logiciel

Les systèmes d'exploitation supportés sont :

- Windows 10 ou 11.
- MAC OS 10.15 Catalina.

Il sera fortement préconisé de s'assurer que les postes de travail soient à jour au niveau du système d'exploitation et des drivers des différents matériels (composants internes et périphériques).

Les navigateurs web validés actuellement par ordre de rapidité sont :

1. Google Chrome version 62 minimum
2. Mozilla Firefox ESR version 56 minimum
3. Microsoft Edge version 41 minimum
4. Microsoft Internet Explorer 11 (nécessite l'installation du KB3139929 et un paramétrage spécifique de la zone intranet local)

Il sera nécessaire de faire des tests préalables si le navigateur utilisé ne fait pas partie de la liste ci-dessus.



Afin de se protéger contre les maliciels, un antivirus doit être installé sur le poste.

4.3 Réseau

Les prérequis du débit montant/descendant pour une utilisation du logiciel par internet sont les suivants :

- Minimum 8Mb si Scanner/IRM ou Tomographie,
- Minimum 4Mb si mammographie,
- Minimum 2Mb si radio/échographie.

En local, un débit minimal de 100Mb est conseillé.

Il est nécessaire de mettre en place de la Qualité de Service (QoS) sur les liens intersites afin de garantir des débits dédiés au transfert d'images.



Un réseau inapproprié rendrait impossible d'utiliser le logiciel. Le protocole HTTPS doit être utilisé pour sécuriser le transfert des données médicales et l'adresse IP du PACS doit être fixe.



Remarques :

- l'application du logiciel XploreView Web sur un réseau TI (Technologies de l'Information) peut engendrer des risques précédemment non identifiés pour les patients, les utilisateurs ou les tiers;
- il est conseillé au client d'identifier, d'analyser, d'évaluer et de maîtriser ces risques;
- les modifications ultérieures apportées au réseau TI peuvent introduire de nouveaux risques et exiger une analyse supplémentaire; et
- les modifications apportées au réseau TI comprennent:
 - o des modifications de configuration du réseau TI;
 - o l'ajout d'éléments (plates-formes matérielles et/ou logicielles ou applications logicielles) au réseau TI;
 - o le retrait d'éléments du réseau TI;
 - o la mise à jour des plates-formes matérielles et/ou logicielles ou applications logicielles sur le réseau TI; et
 - o la mise à niveau des plates-formes matérielles et/ou logicielles ou applications logicielles sur le réseau TI.



Si un échec d'archivage / stockage (PACS) survient, l'accès aux images peut être ralenti ou bloqué.

5 Mise à jour et incompatibilités

Si une mise à jour d'éléments logiciels ou matériels est effectuée par le client, un technicien EDL doit en être informé. Ces éléments sont les suivants :

- Client :
 - o Navigateur internet : Chrome, Firefox, Internet Explorer.
- Serveur :
 - o OS : Windows,
 - o Antivirus/pare-feu,
 - o Matériel physique.

➤ Se référer aux prérequis (cf. §3).

5.1 Antivirus

Il sera demandé d'exclure de l'analyse antivirus les répertoires d'installation (et leurs sous-répertoires) des applications EDL, par exemple :

C:\Program Files (x86)\EDL\

Nb : D'autres exceptions, en fonction des modules utilisés pourront être demandées.

5.2 Windows Server Update Services

Afin d'éviter une saturation de la bande passante liée aux mises à jour Windows ou afin d'éviter l'installation automatique d'une mise à jour qui apporterait une instabilité, EDL préconise la mise en place d'un serveur WSUS afin de pouvoir contrôler le déploiement des mises à jour Windows sur les serveurs et les postes de travail. Mettre en place une Qualité de Service (QoS) permet également d'optimiser la bande passante.

6 Installation- Désinstallation

6.1 Installation

Aucune installation n'est nécessaire côté client.

6.2 Intégration contextuelle avec un RIS/SIH

L'appel contextuel s'effectue en lançant une requête (depuis un RIS, SIH....) qui ouvre un onglet avec XploreView Web.

- La base de l'url est la suivante : https://IP_PACS_DIFF/XaDicomViewer/?
L'adresse IP est celle du serveur où est installé le viewer :
 - Serveur de diffusion sécurisé si accès extérieur,
 - Système PACS interne,
 - ...
- Doit suivre un de ces arguments avec la valeur correspondante :

Argument(s)	Champ DICOM	Champ Xplore	Description	Exemples	Sécurisé
idPatientParam	PatientID	<IPP_NUMDOS> ou <IPP>	Affichage de tous les examens du patient	idPatientParam=A1023466789	Non
stuidParam	StudyInstanceUID	<SUID>	Affichage de l'examen correspondant	stuidParam=2.16.840.1.113669.632.20.540001.10126597542	Non
bdANParam	PatientBirthDate + AccessionNumber	<DATNAI4> + <ACCNUM>	Affichage de l'examen correspondant	bdANParam=19700101A10234661549	Oui
idPatientParam & bdParam	PatientID + PatientBirthDate	<IPP_NUMDOS> ou <IPP> + <DATNAI4>	Affichage de tous les examens du patient	idPatientParam=A1023466789 &bdParam=19700101	Oui
stuidParam & anParam	StudyInstanceUID + AccessionNumber	<SUID> + <ACCNUM>	Affichage de l'examen correspondant	stuidParam=2.16.840.1.113669.632.20.540001.10126597542&anParam=A10234661549	Oui
stuidParam & bdParam	StudyInstanceUID + Birthdate	<SUID> + <DATNAI4>	Affichage de l'examen correspondant	stuidParam=2.16.840.1.113669.632.20.540001.10126597542&bdParam=19700101	Oui

- Exemples d'URL :
<https://192.168.7.100/XaDicomViewer/?idPatientParam=A1023466789>
<https://192.168.7.100/XaDicomViewer/?stuidParam=2.16.840.1.113669.632.20.540001.10126597542>
<https://192.168.7.100/XaDicomViewer/?bdANParam=19700101A10234661549>
<https://192.168.7.100/XaDicomViewer/?idPatientParam=A1023466789&bdParam=19700101>
<https://192.168.7.100/XaDicomViewer/?stuidParam=2.16.840.1.113669.632.20.540001.10126597542&anParam=A10234661549>
<https://192.168.7.100/XaDicomViewer/?stuidParam=2.16.840.1.113669.632.20.540001.10126597542&bdParam=19700101>

6.3 Désinstallation

Aucune désinstallation n'est nécessaire côté client.

7 Démarrage – Authentification

Le logiciel est un pur client lancé par des applications tierces.
L'interface de l'application XploreView Web est décrit au §6.2.

8 Arrêt du logiciel

L'arrêt du logiciel s'effectue en fermant l'onglet du navigateur internet dans lequel il est lancé.




Le logiciel peut être fermé à tout moment sans risques pour la sécurité des données médicales.

9 Utilisation du logiciel

9.1 Ecran de visualisation


- ✓ La date de l'examen de référence est en **vert**, celles des antécédents est en **rouge**.
- ✓ Un clic sur le libellé d'un examen antécédent permet de lancer son téléchargement.
- ✓ Quand un examen est téléchargé, il est possible de masquer ou d'afficher la liste des séries de cet examen en cliquant sur son libellé.

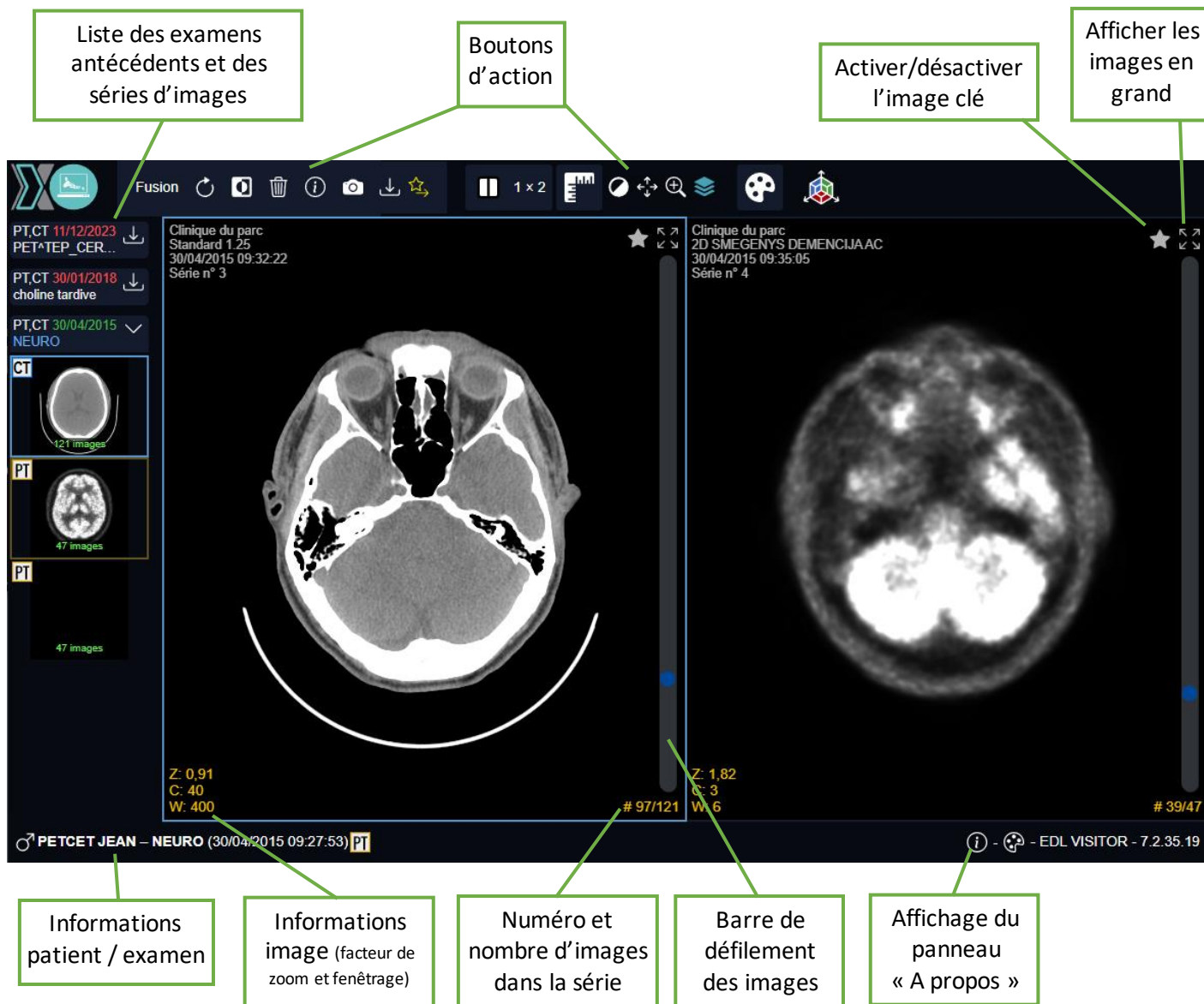

The screenshot shows the XploreView Web interface with the following annotations:

- Liste des examens antécédents et des séries d'images**: Points to the left sidebar containing a list of exams with dates and series counts.
- Boutons d'action**: Points to the top toolbar containing various icons for actions like fusion, zoom, and windowing.
- Activer/désactiver l'image clé**: Points to the top right area where the key image can be toggled.
- Afficher les images en grand**: Points to the top right corner where the full image can be displayed.
- Informations patient / examen**: Points to the bottom left status bar showing patient name and exam details.
- Informations image (facteur de zoom et fenêtrage)**: Points to the bottom left of the main image area showing technical parameters like Z, C, and W.
- Numéro et nombre d'images dans la série**: Points to the bottom center of the main image area showing the current image number and total series count.
- Barre de défilement des images**: Points to the vertical scrollbar on the right side of the main image area.
- Affichage du panneau « A propos »**: Points to the bottom right corner where the 'About' panel can be displayed.

9.2 Boutons d'action

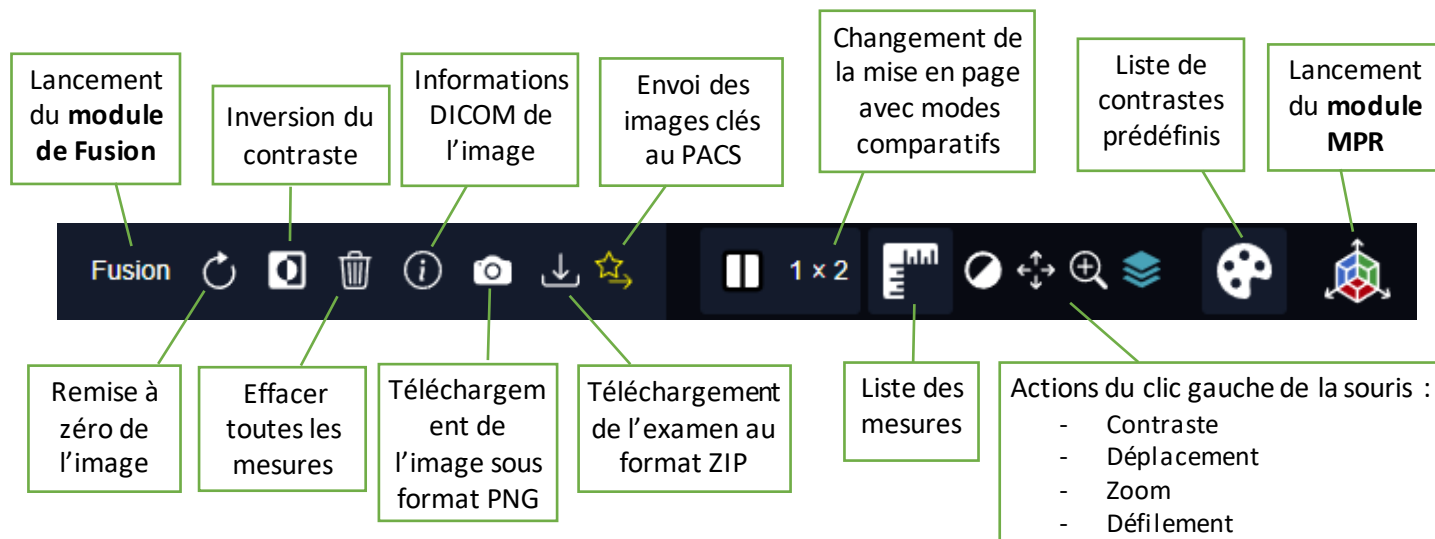


✓ La liste des mesures est la suivante :



Il est possible de modifier une mesure, ainsi que de déplacer la valeur affichée en effectuant un cliqué-glissé de celle-ci.

- ✓ Le lancement du **module MPR** (Multi-Planar Reconstruction), sur une série de scanner CT, lance l'affichage des trois plans : Axial (ou Transverse), Sagittal et Coronal (ou Frontal).

Il est possible de modifier l'orientation et l'épaisseur de coupe des plans via les axes signalés en rouge (**axial**), bleu (**sagittal**) et vert (**coronal**) :

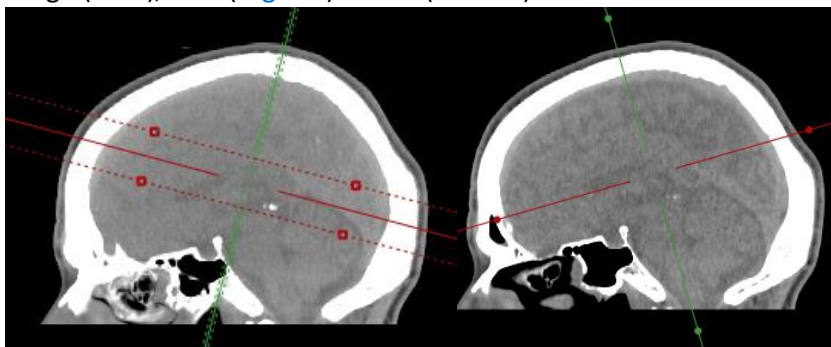

Il est également possible de modifier l'épaisseur de coupe et le type de MIP (MaxIP, MinIP ou Moyenne) via un menu situé en haut à droite de la barre d'outils :



Il est possible d'afficher un plan MPR en grand en cliquant sur le bouton suivant situé en haut à droite des images: 

Il est possible d'appliquer une mise en page de type « Comparaison » pour lancer deux MPR en même temps via le bouton de mise en page :



- ✓ Le **module de Fusion** s'active si un examen de scanner CT qui possède une série de scintigraphie est chargée. Ce module consiste à afficher une série de scintigraphie en surimpression d'une série de scanner CT.

Il est possible de modifier les séries utilisées pour la fusion en effectuant un clic gauche sur la série appropriée dans la liste des séries.

La fenêtre de configuration du module de fusion permet de modifier les éléments suivants :

- Pourcentage (entre 0% et 100%) de transparence appliqué sur la série de scintigraphie qui est affichée sur la série de scanner courante.
-
- Table de couleur ou LUT (LookUp Table) à appliquer sur la série de scintigraphie.



Liste des LUT :


PET	
Hot Iron	
Hot Metal Blue	
Fire-2	
NIH	
PET 20 Steps	
Thermal	
Rainbow-1	
Rainbow-2	

L'outil « Valeur pixel » , la mesure de cercle  et la mesure de rectangle  affichent les valeurs des pixels en SUVbw (g/ml).

Il est possible d'appliquer une mise en page de type « Comparaison » pour lancer deux Fusions en même temps via le bouton de mise en page :




Les valeurs de SUV peuvent être modifiées en cliquant sur la liste des « Contrastes prédéfinis » , puis en sélectionnant une des valeurs ci-dessous :

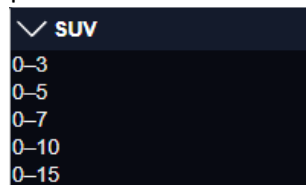

La mise en page par défaut du mode Fusion est la suivante :

- Première ligne : série de scanner CT
- Deuxième ligne : série de scintigraphie
- Troisième ligne : fusion
- Image à droite : « MIP tournant » (il est possible de faire tourner le volume avec la molette de la souris).

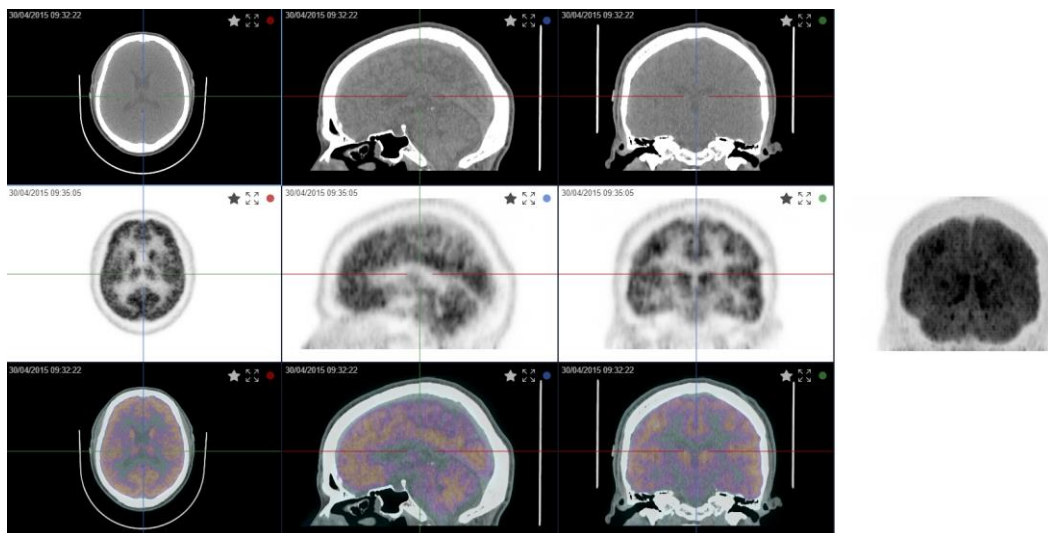

- ✓ Le bouton de téléchargement de l'examen au format DICOM a plusieurs états, en fonction de l'évolution du téléchargement :



état initial



l'examen est en cours de téléchargement. *Il n'est pas possible de télécharger l'examen si un téléchargement est déjà en cours.*




le téléchargement de l'examen est terminé



il y a eu une erreur lors du téléchargement de l'examen

9.3 Fenêtre « A propos »

La fenêtre « A propos » affiche les informations réglementaires du Dispositif Médical XploreView Web :

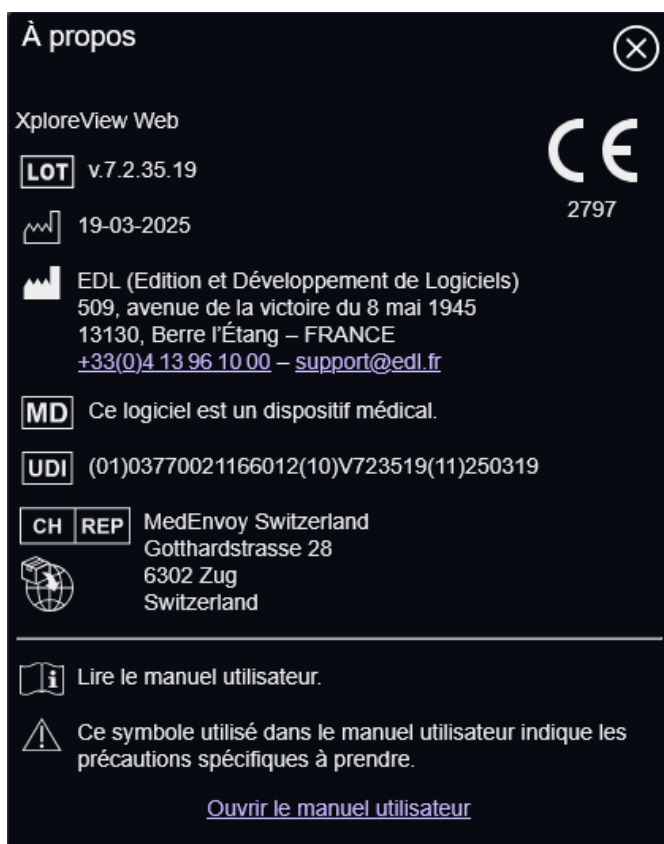

10 Maintenance

La maintenance du logiciel est à effectuer par des techniciens habilités.

En cas de problème, contacter la hotline technique par téléphone au +(33) 4.13.96.10.00 ou par email à « support@edl.fr ».

11 Dépannage, Messages d'erreur



Ce paragraphe doit aider l'utilisateur lors de la survenue d'un problème.

En cas d'anomalie, arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et appeler le service après-vente d'EDL.

S'il n'est pas possible de localiser ou d'éliminer le problème en utilisant ce paragraphe, ou si le dysfonctionnement est toujours présent, éteignez l'appareil et appelez le service après-vente de EDL.

	DANGER
	DANGER N'essayez jamais de réparer l'appareil tout seul

Message d'erreur	Description
<i>Avertissement :</i> <i>Impossible de modifier la mise en page : il n'est pas adapté au module MPR.</i>	La mise en page sélectionnée par l'utilisateur n'est pas adaptée pour le module MPR, il faut sélectionner une mise en page avec au moins trois zones d'image.
<i>Conteneur d'image en cours de chargement :</i> <i>Impossible de changer de série tant que le conteneur d'image n'est pas chargé. Veuillez patienter...</i>	L'utilisateur veut charger une image dans une zone d'affichage d'image en cours de construction, il faut patienter quelques instants avant de pouvoir travailler sur cette zone.
<i>Avertissement :</i> <i>La série est en cours de téléchargement, la reconstruction MPR est partielle.</i>	La série n'est pas encore totalement téléchargée. La reconstruction MPR est donc partiellement effectuée. Il faut patienter que le téléchargement soit terminé pour que la reconstruction soit complète.
<i>Impossible de lancer la reconstruction MPR :</i> <i>L'examen doit être de type CT et avoir un nombre suffisant d'images.</i>	Le module MPR est limité aux examens de scanner CT qui possèdent au moins 5 images.
<i>Impossible de lancer la reconstruction MIP :</i>	La reconstruction MIP ne peut se faire que sur une série axiale native et non à partir d'une reconstruction MPR.

<i>Une reconstruction MPR est lancée</i>	
<i>Impossible de lancer la reconstruction MIP :</i> <i>Veuillez attendre le chargement complet de la série.</i>	La série n'est pas encore totalement téléchargée. Il faut patienter qu'elle soit totalement téléchargée avant de pouvoir lancer une reconstruction MIP.
<i>Impossible de lancer la reconstruction MIP :</i> <i>L'examen doit être de type CT ou MR.</i>	Le module MPR est limité aux examens de scanner CT et d'IRM.
<i>Avertissement :</i> <i>Cette image n'est pas disponible dans la base de données</i>	Un appel contextuel a été effectué sur des données inconnues du système PACS. Veuillez contacter un technicien EDL pour résoudre le problème.
<i>Impossible de charger la série d'image, une partie des images est absente.</i>	Un appel contextuel a été effectué sur des données incomplètes dans le système PACS. Veuillez contacter un technicien EDL pour résoudre le problème.
<i>Information :</i> <i>XploreView Web est un Dispositif Médical permettant de réaliser un diagnostic. Le logiciel doit être utilisé sur un poste adapté avec un écran médical.</i>	Il est impossible pour le logiciel de savoir s'il est lancé sur un écran médical. Un message d'avertissement s'affiche alors au lancement du logiciel.
<i>Information :</i> <i>Cette version d'XploreView Web n'est pas un Dispositif Médical. Pour des raisons légales, le logiciel ne doit pas être utilisé pour réaliser un diagnostic.</i>	Le logiciel n'a pas été vendu et installé en tant que Dispositif Médical, il n'est donc pas possible d'effectuer un diagnostic avec le logiciel.
<i>Avertissement :</i> <i>Vous utilisez le logiciel XploreView Web avec un appareil disposant de X Go de mémoire RAM. Cela peut être insuffisant pour charger des images de scanner.</i>	Le matériel qui a lancé le logiciel possède un nombre insuffisant de mémoire RAM. Ce message avertit l'utilisateur que des dysfonctionnements peuvent survenir lors du chargement de cet examen de scanner.
<i>Avertissement :</i> <i>Vous utilisez le logiciel XploreView Web avec un appareil disposant de X Go de mémoire RAM. Cela peut être insuffisant pour charger cet examen.</i>	Le matériel qui a lancé le logiciel possède un nombre insuffisant de mémoire RAM. Ce message avertit l'utilisateur que des dysfonctionnements peuvent survenir lors du chargement de cet examen.
<i>Avertissement :</i> <i>Il est impossible de vérifier la taille de</i>	Il est impossible de détecter la mémoire RAM de l'appareil qui a lancé le logiciel. Il est donc possible qu'il possède un nombre insuffisant de mémoire RAM. Ce message avertit

<i>vosre mémoire RAM. Elle peut être insuffisante pour charger cet examen.</i>	l'utilisateur que des dysfonctionnements peuvent survenir lors du chargement de cet examen.
Avertissement : <i>Vous utilisez le logiciel XploreView Web avec un écran disposant d'une faible résolution. Cela peut être insuffisant pour effectuer un diagnostic médical.</i>	La résolution de l'écran est faible, cela peut être insuffisant pour visualiser l'examen et effectuer un diagnostic.
Avertissement : <i>Il est impossible de vérifier la résolution de votre écran. Elle peut être insuffisante pour visualiser cet examen.</i>	Il est impossible de détecter la résolution de l'écran de l'appareil qui a lancé le logiciel. Il est donc possible que la résolution de l'écran soit faible et que cela soit insuffisant pour visualiser l'examen et effectuer un diagnostic.
Information : <i>Impossible de télécharger l'examen car il est déjà en cours de téléchargement.</i>	Il est impossible de télécharger l'examen car il est déjà en cours de téléchargement. Il faut attendre que le téléchargement soit terminé pour que le bouton de téléchargement de l'examen au format DICOM puisse lancer de nouveau un téléchargement.
Erreur : <i>Erreur lors du téléchargement de l'examen.</i>	Il y a eu une erreur lors du téléchargement de l'examen au format DICOM. Veuillez relancer le téléchargement pour essayer de le re-télécharger. En cas d'échec systématique, veuillez contacter le service technique d'EDL.
Attention : <i>L'examen est volumineux (x images), veuillez patienter pendant le téléchargement dans votre navigateur internet...</i>	Ce message apparait pour signaler à l'utilisateur que le téléchargement risque de prendre du temps.
Information : <i>Veuillez patienter pendant le téléchargement de l'examen dans votre navigateur internet...</i>	Ce message apparait pour signaler à l'utilisateur que le téléchargement est en cours et qu'il doit patienter que le téléchargement se termine.
<i>Le lien d'accès vers l'examen est copié dans le presse-papier</i>	Ce message apparait lorsque l'utilisateur clique sur le bouton d'envoi d'email, afin de lui signaler que le lien d'accès unique est également copié dans le presse-papier (si la fonction mailto n'est pas paramétrée sur son ordinateur).

Dysfonctionnement	Causes	Solutions
<i>Bug car le logiciel n'est pas à jour</i>	Le logiciel n'a pas été mis à jour et n'intègre pas les dernières corrections logicielles.	Redémarrer le logiciel pour appliquer la dernière mise à jour.
<i>Impossibilité de mettre à jour le logiciel.</i>	Le logiciel ne peut pas se connecter au serveur d'application.	Modifier la configuration réseau du poste pour avoir accès au serveur d'application. Si besoin, contacter le support technique EDL.

12 Garantie

Veuillez-vous référer aux conditions de garantie de votre contrat de maintenance.

13 Mentions légales

13.1 Responsabilités

EDL n'accepte aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte ou non professionnelle du logiciel XploreView Web.

EDL n'est pas responsable de la qualité, de la légalité ou de l'exactitude des images acquises par les appareils producteurs d'images. Par conséquent, l'utilisateur doit utiliser le logiciel et ses résultats avec précaution.

13.2 Copyrights et marques

Windows est une marque appartenant à Microsoft Corporation aux USA et autres pays.

Mac est une marque d'Apple Corporation aux USA et autres pays.

Tous les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

14 Contact Fabricant



v.7.2.35.19



Date de publication : 2025-03-19



Ce logiciel est un dispositif médical



(01)03770021166012(10)V723519(11)250319



Lire le manuel utilisateur



Ce symbole utilisé dans le manuel utilisateur indique les précautions spécifiques à prendre



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



EDL (Edition et Développement de Logiciels)

509, avenue de la victoire du 8 mai 1945 - 13130 Berre l'Étang - FRANCE

Hotline : +(33) 4.13.96.10.00

@: support@edl.fr

Site : <http://www.edl.fr>